

Alpha-Cem™

Стоматологічний цемент Alpha-Cem для фіксації на імплантатах. Композитний цемент для тривалої фіксації постійних і тимчасових реставрацій на зубах і імплантатах на основі пружного уретанового олигомера. Не містить евгенолу.

Alpha-Cem™ забезпечує міцне з'єднання, дозволяючи при цьому відносно легко видалити, при необхідності, коронку з абатмента (зуба, вкладки). Чудові характеристики при роботі з матеріалом, повне затвердіння, відмінні якості очищення від небажаного матеріалу.

Властивості Alpha-Cem™

- Унікальне двоступеневе затвердіння. На стадії первинного затвердіння цемент набуває резиноподібну консистенцію, при якій надлишки матеріалу можуть бути легко видалені, що спрощує роботу з матеріалом;
- Повна полімеризація і низька розчинність в слині забезпечують високу міцність;
- Для комфорту пацієнта позбавлений смаку і запаху.

Технічні дані Alpha-Cem™

Час полімеризації	початкова	90 - 120 секунд	1.5 – 2 хвилини
	остаточна	240 – 300 секунд	4 – 5 хвилин
Міцність на вигин	Мінімум 40 МПа		
Товщина плівки	15 мікрон		
Гігроскопічність	< 40 мікрограм/мм³		
Розчинність	< 7.5 мікрограм/мм³		
Лінійна усадка	2.5%		

Галузь застосування:

Alpha-Cem™ використовують для постійного цементування коронок і мостів на імплантатах

Запобіжні заходи:

Alpha-Cem™ містить полімеризуючі мономери, здатні викликати у людей із підвищеною чутливістю алергічну реакцію. У разі потрапляння на шкіру або слизову слід промити. При появі алергічної реакції або в разі отримання алергії на метакрилатних смолах необхідно визначити використання.

Основні компоненти Alpha-Cem™

- Аліфатичний уретан акрилат
- Мульти-функціональні метакрилати
- Активатор полімеризації
- Уретан-диметакрилат

Інструкція по застосуванню Alpha-Cem™

- Завершіть усі підготовчі процедури, переконайтеся в локалізації областей, на яких буде застосовуватися матеріал, перевіряйте готовність всього необхідного
- Ізолюйте і висушіть підготовлену зону для нанесення матеріалу. Повне просушування необов'язково. Обов'язковою умовою є усунення природних забруднень з локалізованою зони
- Випустіть повітря зі шприца перед установкою змішувача. Встановіть новий змішувач (насадку) на шприц з Alpha-Cem™ і знову випустіть повітря з шприца
- Забезпечте чистоту і сухість внутрішньої поверхні коронки. Шприц з цементом направте всередину коронки. 45-60 секунд - час, необхідний для завершення роботи
- Негайно надіньте коронку (коронки) і утримуйте на місці (або попросіть пацієнта закрити рот, використовуючи марлевий валик) до початкового затвердіння, яке настане через 90 - 120 секунд. Початкове затвердіння характеризується резиноподібною консистенцією матеріалу. На цьому етапі надлишки цементу можуть бути з легкістю видалені
- Остаточне затвердіння цементу відбудеться через 4 - 5 хвилин



Alpha Dent Implants

Hanauer Straße, 8,
75181 Pforzheim, Germany



Стоматологічний цемент Alpha-Cem для фіксації на імплантатах

Уповноважений представник в Україні
ТОВ «Альфа Дент Імплантс Україна»
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Шолом-Алейхема, 4/26, прим.1104/2.

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення. Зберігати в сухому місці при температурі нижче 24°C