

DENTOTEMP (ДЕНТОТЕМП) цемент для тимчасової фіксації

Цемент для довготривалої тимчасової фіксації
Безевгенольний цемент для тимчасової фіксації на основі уретан-акрилового полімеру. Розроблений спеціально для фіксації протезів на імплантатах.

ПОКАЗАННЯ:

- Тимчасова фіксація на природних, невідновлених зубах (композит, кука).
- Для лікування відновлених зубів користуйтеся матеріалом Provitemp.
- Тимчасова фіксація косметичних елементів, таких як вініри та накладки.
- Постійна фіксація коронок і мостоподібних протезів з опорою на імплантати з можливістю зняття.

ВЛАСТИВОСТІ:

- DentoTemp – це цемент для тимчасової фіксації, який не містить евгенолу, оксиду цинку й ефірних олій, і тому він легко зчищається та не перешкоджає постійній адгезивній фіксації протеза. Полімеризація здійснюється у два етапи, щоб зайвий цемент можна було видалити швидше й легше, без наслідків для робочого часу та характеристик матеріалу.
- DentoTemp ідеально підходить для постійної фіксації коронок на імплантатах. Він полегшує процес фіксації та забезпечує високу ретенцію, а у разі потреби реставраційну конструкцію можна буде видалити.
- Через низький рівень розчинності в рідинах ротової порожнини та швидке твердіння ретенція буде дуже високою.
- Всередині ротової порожнини матеріал забезпечує дуже високу стабільність і дуже високий механічний опір.
- Оскільки матеріал не має присмаку й запаху, пацієнт почуватиметься комфортніше.

1

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

У рідкісних випадках деякі пацієнти можуть мати підвищену чутливість до цього матеріалу. Якщо виникне алергічна реакція, припиніть застосування матеріалу, видаліть його з ротової порожнини пацієнта та направте пацієнта до лікаря. Використовуйте одноразові канюлі.

СКЛАД:

- Bis-GMA
- HEMA
- TEGDMA
- кремній та інші речовини

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

- Щоб виріб краще зберігався, тримайте його в холодильній камері.* (температура нижче 24 °C).
- * Якщо шприц зберігався у холодильній камері, перед тим, як почати ним користуватися, він має нагрітись до кімнатної температури.
- Застосовується виключно у галузі стоматології.

	Захищайте від вологи
	Ознайомтеся з інструкцією із застосування
	Артикул
	Виробник
	Захищайте від впливу сонячного проміння
	Верхня межа температури
	Номер партії
	Медичний виріб
	Використати до

3

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Замішування DentoTemp вручну:

- 1) Нанесіть рівні порції базової пасти та каталізатора на блокнот для замішування.
- 2) Ретельно замішуйте їх шпателем протягом 20-30 секунд.

Automix:

Видавіть невелику кількість матеріалу зі шприца перед тим, як встановити на ньому змішувальну канюлю, і потім знову видавіть невелику порцію матеріалу та викиньте її.

Фіксація тимчасових протезів:

Перед тим, як зафіксувати цементом тимчасову коронку, перевірте точність посадки, оклюзію, апроксимальні контакти і виконайте всі процедури фінішної обробки.

- 1) Просушіть та ізолюйте відпрепаровані поверхні. Необов'язково, щоб поверхня стала повністю сухою, проте необхідно не допустити забруднення слиною.
- 2) Переконайтеся в тому, що внутрішня поверхня тимчасової коронки чиста й суха. Внесіть замішаний цемент безпосередньо у тимчасову коронку. Робочий час: 45-60 секунд.
- 3) Одразу встановіть коронку, після чого або утримуйте її на місці, або попросіть пацієнта легко прикусити ватний валик, доки не закінчиться початкове твердіння (2-2½ хвилини). Після початкового твердіння матеріал набуває вираженої гумоподібної консистенції, і тому його зайву кількість можна легко видалити зондом.
- 4) Також введіть зонд у міжзубні проміжки, щоб видалити з них зайвий цемент, поки не почалося остаточне твердіння.
- 5) Твердіння цементу всередині ротової порожнини триває приблизно 4-5 хвилин – залежно від умов.

Постійна фіксація постійних коронок на імплантатах:

Процедура фіксації постійної коронки на металевому або металево-керамічному абатменті проводиться так само, як фіксація тимчасової коронки. Не рекомендується перед фіксацією обробляти абатменти засобом для протравлювання титану. Якщо коронку необхідно видалити, зазвичай достатньо легко постукувати коронкознімачем.

2

RxOnly	Рецептурний препарат
	Викликає подразнення
	Одноразові канюлі

Дата перегляду інструкції: 09/2020



АЙТЕНА КЛІНІКАЛ
31 Авеню Жоржа Клемансо,
93420 Вільпент, Франція
тел. +33(0)1 45 91 61 40
www.itena-clinical.com

4